	FICHA TECNICA		FT-01	
	BRIX 3000		Rev.0	Fecha: 09/06/22

BRIX S.R.L.


Ruta 9 Km 348,5 - 2138 Carcarañá, Provincia de Santa Fe, Argentina

Atención al Cliente: 0054 0341 4943094

E-mail: info@brix-lab.com

Página 1 de 2

ID	PAIS SEDE	LINEA	GRUPO	TIPO DE PRODUCTO
	Argentina	BRIX	Fabricante	Producto Médico CR I
NOMBRE COMERCIAL		BRIX 3000		
TITULAR		BRIX S.R.L.		
DIRECCION		Ruta 9 Km 348.5 - Parque Industrial Carcarañá - (2138) Carcarañá – Provincia de Santa Fe – Argentina		
FABRICANTE		ANMAT Legajo N° 2177		
REGISTRO ANMAT		PM-2177-1		
CONTACTOS		Tel/fax: 54 341 4943094 email: consultas@brix-lab.com - www.brix-lab.com		
COMPOSICION		Papaína 30.000 U/mg Excipientes (Propilenglicol, Pectina cítrica, Trietanolamina, Monolaurato de sorbitan, Fosfato di sódico, Fosfato monopotásico, Azul de toluidina, Agua destilada)		
VENCIMIENTO		24 meses		
USO INDICADO		Remoción a traumática de lesiones cariosas.		
FORMA DE USO		Preparación previa: de ser necesario ampliar la cavidad con instrumental de mano o rotatorio si se dispone, hasta lograr cavidad expulsiva. En lesiones amplias, colocar directamente. Aislamiento relativo con rollos de algodón. Aplicar BRIX 3000 sobre la cavidad dejando actuar 2 minutos. Retirar el material con cucharitas sin filo, con movimientos pendulares y sin presión. Repetir la operación hasta la presencia de dentina sana. Corroborar la presencia de dentina sana con el explorador y detector de caries. En caso necesario realizar recubrimiento pulpar y colocar inmediatamente material de obturación.		
ASPECTO		Gel celeste verdoso, humectado.		
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:		<p>CONTRAINDICACIONES: Piezas que presenten sintomatología dolorosa de cualquier tipo. Fístulas. Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes.</p> <p>PRECAUCIONES: No exponer el producto en forma directa al sol o conservar dentro de su envase. No utilizar si el envase está dañado o con el precinto de seguridad violado. Por presentarse en envase multidosis, tapar bien después de cada uso. No utilizar después de su fecha de vencimiento. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar escariador sin filo. Se recomienda utilizar protección ocular en profesionales, asistentes y pacientes.</p> <p>ADVERTENCIAS: Solo para ser manipulado por profesionales odontólogos. El envase vacío no es reutilizable para ningún concepto.</p> <p>POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS: No existen efectos secundarios conocidos</p>		
PRESENTACIONES		Jeringas de 0,5, 1.0, 3.0 o 5.0 ml o pomos de 2, 3, 4, 5 o 6ml multidosis.		
ENVASE PRIMARIO		Cajas x 1 unidad.		

	FICHA TECNICA	FT-01	
	BRIX 3000	Rev.0	Fecha: 09/06/22

BRIX S.R.L.

Ruta 9 Km 348,5 - 2138 Carcarañá, Provincia de Santa Fe, Argentina

Atención al Cliente: 0054 0341 4943094

E-mail: info@brix-lab.com

Página 2 de 2

ENVASE SECUNDARIO	Caja de cartón x 25, 50 y 100 unidades
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Conservar entre 4 y 36°C Evitar la exposición a la luz. Evitar los golpes.
CONDICION DE USO	Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias
OBSERVACIONES:	N/A

INFORMACION DE PROPIEDAD DE BRIX SRL- ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER REPRODUCIDO O DIVULGADO A OTROS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE BRIX SRL.

EL USUARIO ES RESPONSABLE DE ASEGURARSE, QUE LA VERSIÓN DEL DOCUMENTO ES LA VIGENTE PARA SU ADECUADO USO.